

## 速保精 II 精液稀釋劑

### Sperm Up II Semen extender

#### 前言

豬隻人工授精的精液稀釋保存液，以往都採用粉狀稀釋劑，該系稀釋劑成分容易受原料影響而變動，影響人工授精的擴展，本公司有鑑於此，經改良液態化稀釋劑以適應高濕環境氣候，經濟效益明顯的提高，廣泛供應國內外畜牧業的需要，以擴大業者人工授精的好處。

#### 使用方法：

1. 精液稀釋前先測定精液之溫度。
2. 調整稀釋液與精液溫度相同後始給與稀釋。
3. 稀釋倍數依精液濃度稀釋(2~10 倍)。
4. 將稀釋之精液隔水置于  $16\pm 1^{\circ}\text{C}$  恆溫冰箱。
5. 請將未用完之稀釋精液每天給與混勻一次(建議使用本稀釋劑稀釋之精液在 3 天用完)。
6. 未用完之稀釋液可保存于  $5^{\circ}\text{C}$  一周， $-20^{\circ}\text{C}$  可保存 3 個月。
7. 本稀釋劑于儲存或運輸時應避免陽光直射以確保產品品質。



**中國化學製藥股份有限公司**  
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號